

Nacharbeiten von Monolithischen Kronen/Brücken

Im Mund

Einschleifen der Okklusion mit Hilfe einer feinkörnigen Diamantfräse (roter Ring)

- mit Wasserkühlung bei unter 18.000 min^{-1} Umdrehungen.



Im Anschluss die beschliffene Fläche mithilfe von Gummipolierer glätten und auf Hochglanz polieren.

- Gummipolierer (blau) zum Glätten (max. 10.000 min^{-1})
- Gummipolierer (grau) für Hochglanz (max. 10.000 min^{-1})



Ebenfalls ist eine Hochglanzpolitur mithilfe von Keramikpolierpaste und einem weichen Ziegenhaarbürstchen möglich.

Vor dem definitiven Einsetzen

Ränder

- mit blauen Gummischeibe zum Kronenrand ausdünnen.



Okklusion

- mit Zirkon-Steinchenfräse einschleifen bzw. Frühkontakte reduzieren. (max. 12.000 min^{-1}) Umdrehungen.
- Bearbeitete Flächen mit einem blauen Gummipolierer glätten. (max. 10.000 min^{-1})

